



Ре-Эпитол

МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТАҒЫ БҰЙЫМДЫ МЕДИЦИНАДА ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Медициналық мақсаттағы бұйымның атауы

Ре-Эпитол, шайыр негізіндегі жақпамай, сыртқа қолдануға арналған, 30 г

Бұйымның құрамы мен сипаттамасы

Шайыр негізіндегі жақпамай
Шайыр негізіндегі 30 г жақпамайдың құрамында:
белсенді зат - еуропалық шырышаның тазартылған шайыры (Picea abies) 176,4 мг (салмақтың 15%),
қосымша заттар: вазелин, сұйық парафин, денат спирті, микрокristалды күкірт, сорбитан олеаты, ақ күкірт, гидрогенделген майсана майы, стеарин қышқылы.

Қолданылу саласы

Терінің инфекция жұқтырған және инфекция жұқтырмаған, жедел және созылмалы зақымдануларының жазылуын жеңілдету үшін қолданылады: сыдырулар, сызаттар, күйік жаралары, трофикалық және диабеттік ойық жаралар, асқынған хирургиялық жаралар және ашық күлдіреуіктер.

Әсер ету механизмі

Ре-Эпитол жақпамаймен жараны тазартудың тиімділігі еуропалық шырышаның (Picea abies) табиғи өңделмеген шайырындағы қосылыстардың биологиялық әсеріне негізделген. Ре-Эпитол жақпамайы медициналық мекемеде және үйде инфекция жұқтырған және инфекция жұқтырмаған жараларды жергілікті емдеу үшін қолданылады.

Қолдану тәсілі

Алдын ала сыдыруларды, терінің зақымдануы немесе жараларды сумен жуып, құрғату керек. Ре-Эпитол терінің тікелей зақымдалған аумағына күніне 1-2 рет қолданылады. Қажет болса, зақымдалған аймақты дәке немесе аяу өткізетін таңғышпен жабуға болады. Медбике / дәрігер қолданыстағы ұсыныстарға сәйкес жаралар мен ашылған күлдіреуіктердің бетін өңдейді. Ре-Эпитол жараның беткейінде микробқа қарсы үлбір түзеді, ол оны ластанудан қорғайды және тез және тиімді жазылуға ықпал етеді.

Дәрігермен өзара әрекеттесуі

Клиникалық маңызды өзара әрекеттесулер байқалмады.

Жағымсыз әсерлері (әсер ету, жекеley жақпаушылық) Шайыр компоненттеріне аллергиялық реакцияны қоса, жағымсыз әсерлер дамуы мүмкін. Аллергиялық реакцияның симптомы - бұл қолдану аймағындағы терінің жергілікті тітіркенуі (аллергиялық жанаспалы дерматит).

Қолдануға болмайтын жағдайлар

Бұйым компоненттеріне жоғары сезімталдық

Сақтық (қауіпсіздік) шаралары

Жақпамайдың көзге немесе ауызға түсуін болдырмау керек. Егер күмәніңіз болса, емдеуші дәрігермен немесе фармацевтпен кеңесіңіз.

Жүктілік және лактация

Жүктілік және бала емізу кезеңінде ықтималды жағымсыз әсерлер туралы ақпараттың болмауына байланысты Ре-Эпитолды жүктілік және бала емізу кезінде қолдануға болмайды.

Айрықша нұсқаулар

Халықтың шамамен 1-3%-ы шайырға аллергиядан зардап шегеді. Егер аллергия симптомдары пайда болса, жақпамайды қолдануды тоқтатып, өндірушіге/оның өкіліне барлық анықталған жағымсыз әсерлер, өзара әрекеттесулер және т.б. туралы хабарлау керек.

Егер шайырларға сезімталдық белгісіз болса, Ре-Эпитолды алдымен терінің шағын аймағына тестілеу керек. Егер 3 күн ішінде аллергия симптомдары пайда болса (қышыну, эритема, ісіну, күлдіреуіктер және т.б.), Ре-Эпитолды қолдануға болмайды. Егер аллергия симптомдары кейінірек, емдеу кезінде пайда болса, Ре-Эпитолды қолдануды дереу тоқтатып, емдеуші дәрігермен кеңесу керек.

Көлік құралдарын басқару және техникамен жұмыс істеу қабілетіне әсер етуі: әсер етпейді.

Шығарылу түрі және қаптамасы

30 г препараттан бұрандалы қақтағы бар алюминий немесе полиэтилен/алюминий/полиэтилен сықпаға салынған. 1 сықпадан медициналық қолдану жөніндегі қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.

Сақтау шарттары

25 °C-ден аспайтын температурада сақтау керек. Ашық күйде жақпамай бөлме температурасында бір жыл бойы тұрақты болады. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек!

Сақтау мерзімі

5 жыл
Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды.

Дәріханалардан босатылу шарттары

Рецептісіз



Өндіруші ұйым

VEGAPHARM LLP,
Unit 18, 53 Norman Road, Greenwich Centre Business Park, Лондон, Ұлыбритания, SE10 9QF,
тел.: +44-203-598-2050
Email: info@vegapharm.com

Өндірістік алаң

HELP S. A.,
Pedini Ioanninon, Ioannina 455000, Греция,
Тел. +302102815353,
Эл. Пошта: info@help.com

Өндірушінің уәкілетті өкілі

«СЕРПЕУС Медикал» (ЦЕФЕЙ Медикал) ЖШС,
050045, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 7 үй,
«НұрлыТау» ТК, 5А блок, 247 кеңсе,
телефон: +7 (727) 300 69 71, +7 777 175 00 99 (тәулік бойы),
электрондық пошта: drugsafety@evoleto.co.uk

Қазақстан Республикасының аумағында тұтынушылардан медициналық мақсаттағы бұйымдар бойынша шағымдарды (ұсыныстарды) қабылдайтын ұйымның атауы және мекенжайы:

«СЕРПЕУС Медикал» (ЦЕФЕЙ Медикал) ЖШС, 050045, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 7 үй, «НұрлыТау» ТК, 5А блок, 247 кеңсе,
телефон: +7 (727) 300 69 71, +7 777 175 00 99 (тәулік бойы),
электрондық пошта: drugsafety@evoleto.co.uk



Vegapharm



Өндіруші ұйым



Өтінімін,
нұсқаулықпен
танысыңыз



...депін пайдалану керек
(жарамдылық мерзімі)



Сериясы



25°C
Температураны
шектеу