



Ре-Эпитол

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Название изделия медицинского назначения

Ре-Эпитол, мазь на основе смолы, для наружного применения, 30 г

Состав и описание изделия

Мазь на основе смолы

30 г мази на основе смолы содержат:

активное вещество - рафинированная смола ели европейской (*Picea abies*) 176,4 мг (15% от веса),

вспомогательные вещества: вазелин, парафин жидкий, денатный спирт, сера микрокристаллическая, сорбита́на олеат, сера белая, гидрогенизированное касторовое масло, стеариновая кислота.

Область применения

Применяется для облегчения заживления инфицированных и неинфицированных, острых и хронических повреждений кожи: ссадин, трещин, ожоговых ран, трофических и диабетических язв, осложненных хирургических ран и вскрытых волдырей.

Механизм действия

Эффективность очищения раны мазью Ре-Эпитол основана на биологическом действии соединений, содержащихся в натуральной необработанной смоле ели европейской (*Picea abies*). Мазь Ре-Эпитол применяется для местного лечения инфицированных и неинфицированных ран в медицинском учреждении и в домашних условиях.

Способ применения

Предварительно ссадины, повреждения кожи или раны необходимо промыть водой и высушить. Ре-Эпитол наносится непосредственно на пораженный участок кожи 1-2 раза в день. При необходимости, пораженный участок можно прикрыть марлей или дышащей повязкой. Медсестра/врач обрабатывают поверхность ран и вскрытых волдырей в соответствии с действующими рекомендациями. Ре-Эпитол образует на поверхности раны противомикробную пленку, которая защищает ее от загрязнения и способствует быстрому и эффективному заживлению.

Лекарственные взаимодействия

Клинически значимых взаимодействий не отмечалось.

Побочные действия (воздействие, индивидуальная непереносимость) Возможно развитие побочных эффектов, включая аллергическую реакцию на компоненты смолы. Симптомом аллергической реакции является местное раздражение кожи в области нанесения (аллергический контактный дерматит).

Противопоказания для применения

Повышенная чувствительность к компонентам изделия

Меры предосторожности (безопасности)

Следует избегать попадания мази в глаза или в рот. Если у вас имеются сомнения, проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Беременность и лактация

Не следует применять Ре-Эпитол в период беременности и кормления грудью в связи с отсутствием информации о возможных побочных эффектах во время беременности и грудного вскармливания.

Особо указания

Приблизительно 1-3% населения страдают аллергией на смолу. Если появились симптомы аллергии, применение мази необходимо прекратить и сообщить производителю/его представителю обо всех выявленных побочных эффектах, взаимодействиях и т.д. Если чувствительность к смолам неизвестна, Ре-Эпитол необходимо предварительно протестировать на небольшом участке кожи. Если в течение 3 дней появляются симптомы аллергии (зуд, эритема, отеки, волдыри и т.д.), Ре-Эпитол применять нельзя. Если симптомы аллергии проявляются позже, в период лечения, необходимо немедленно прекратить применение Ре-Эпитол и обратиться к лечащему врачу.

Влияние на способность управления транспортными средствами и работы с техникой: не влияют.

Форма выпуска и упаковка

По 30 г препарата помещают в алюминиевую или полиэтилен/алюминий/полиэтиленовую тубу с винтовым колпачком. По 1 тубе вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C

В открытом состоянии, мазь стабильна при комнатной температуре в течение одного года. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

5 лет

Не применять после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта



Организация-производитель

VEGAPHARM LLP,

Unit 18, 53 Norman Road, Greenwich Centre Business Park, Лондон, Великобритания, SE10 9QF,

тел.: +44-203-598-2050

Email: info@vegapharm.com

Производственная площадка

HELP S.A.,

Pedini Ioanninon, Ioannina 455000, Греция,

Тел. +302102815353,

Эл. Почта: info@help.com

Уполномоченный представитель производителя

ООО «СЕРПЕУС Медикал» (ЦЕФЕЙ Медикал),

050045, Республика Казахстан, г. Алматы,

Проспект Аль-Фараби, дом 7, ЖК «Нурлы Тау», блок 5А,

офис 247,

телефон: +7 (727) 300 69 71, +7 777 175 00 99 (круглосуточно),

электронная почта: drugsafety@eviolet.co.uk

Наименование и адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии (предложения) по изделиям медицинского назначения от потребителей:

ООО «СЕРПЕУС Медикал» (ЦЕФЕЙ Медикал),

050045, Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Аль-Фараби,

дом 7, ЖК «Нурлы Тау», блок 5А, офис 247,

телефон: +7 (727) 300 69 71, +7 777 175 00 99 (круглосуточно),

электронная почта: drugsafety@eviolet.co.uk



Vegapharm



Организация-
производитель



Пожалуйста,
ознакомьтесь с
инструкцией



Использовать до
(срок действия)



Серия



Ограничение
температуры